

# NÁVOD K POUŽITÍ

## DURALOVÁ HŮL

ANATOMICKÁ

ergonomická rukojeť

---

zesílený hliníkový rám  
o síle 1,2 mm

---


upravitelná výška  
v rozmezí 67 - 90 cm

---

vyměnitelný protiskluzový  
nástavec

---

nosnost 135 kg

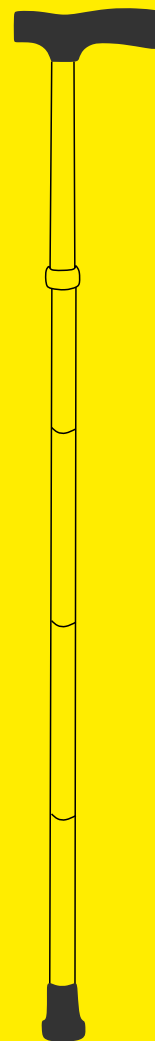

**BESCO**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost a nastavení výšky konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 135 kg. Při upravování výšky postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu. Při pohybu na vlhkém nebo kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme používat pouze s vhodnou obuví s pevnou patou. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele

## POUŽITÍ

Hůl je kompenzační pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou mobilitou. Hůl poskytuje uživateli odlehčení dolních končetin, oporu a stabilitu při chůzi. Používá se i pro pacienty při pouřazových či pooperačních stavech nebo při rehabilitaci.

## NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Stiskněte bezpečnostní pojistku (1) a tahem nebo tlakem posuňte do požadované polohy (2). Pojistku nechte volně zapadnout do nejbližšího otvoru (3). Optimální výšku konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

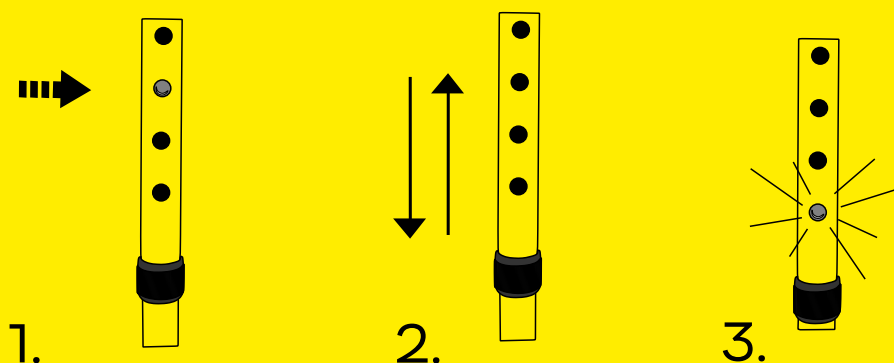

## ÚDRŽBA

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola a stav výškové pojistky a protiskluzového nástavce. Pro zachování bezpečnosti použití doporučujeme opotřebovaný protiskluzový nástavec neprodleně vyměnit. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel.

## SERVIS A OPRAVY

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

## PARAMETRY

Délka hole: 67 – 90 cm

Počet výškových poloh: 10

Hmotnost: 0,3 kg

Nástavec: 100 CTB/C (průměr: 16 mm)

Nosnost: 135 kg