


NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO VANY

ZÁVĚSNÁ

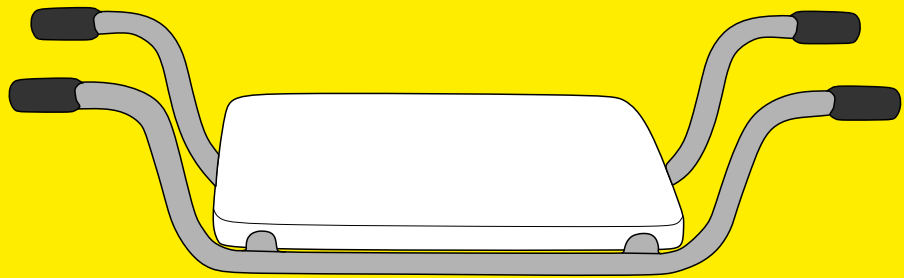

hliníkový rám o síle 1,2 mm

protiskluzová držadla

rozměr sedátka 41 x 21 cm

celková šířka 74 cm

nosnost 150 kg

BESCO

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost a nastavení výšky sedačky konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 150 kg. Při sestavování sedačky postupujte opatrně, abyste se vyvarovali zachycení nebo úrazu ruky či prstů. Pro zajištění větší bezpečnosti doporučujeme kombinovat sedačku s madlem a protiskluzovou podložkou. Ujistěte se, že na sedačce nejsou zbytky mýdla, toaletních potřeb a čistících prostředků. Sedačka by měla být před použitím suchá. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

POUŽITÍ

Sedačka do vany je kompenzační pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou mobilitou. Sedačka usnadňuje uživateli proces osobní hygieny, snižuje riziko pádu či úrazu, usnadňuje manipulaci s pacientem s omezenou schopností pohybu.

POPIS

Rám sedačky je vyroben z hliníkových trubek o síle 1,2 mm s povrchovou úpravou. Sedátko je z odolného plastu. Pro zvýšení bezpečnosti jsou opěrná držadla opatřena protiskluzovými pryžovými nástavci.

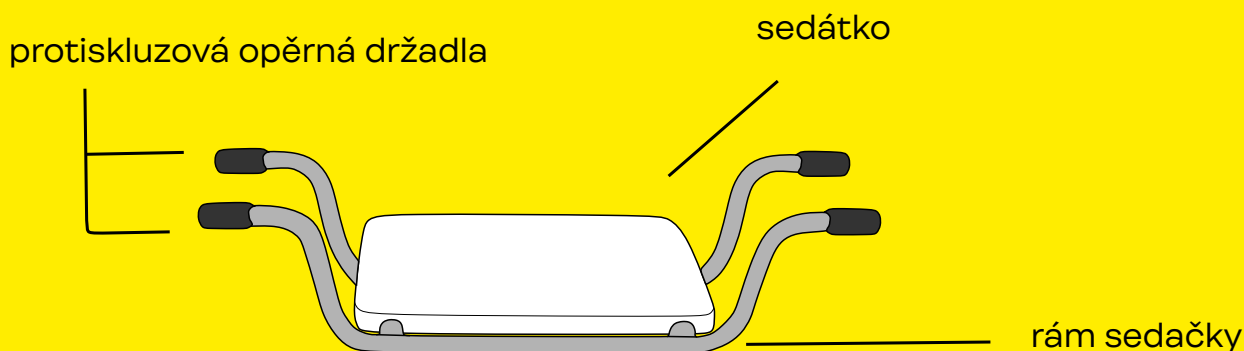

ÚDRŽBA

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola stavu sedačky. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel.

SERVIS A OPRAVY

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

PARAMETRY

Výška: 18 cm

Šířka: 74 cm

Hloubka: 21 cm

Rozměr sedačky: 41 x 21 cm

Hmotnost: 1,1 kg

Nosnost: 150 kg