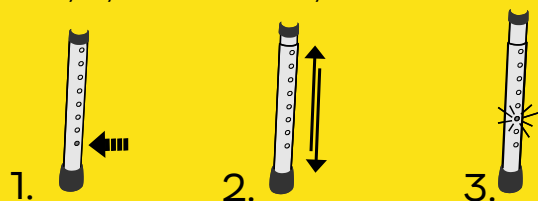


NASTAVENÍ VÝŠKY KŘESLA

Stiskněte bezpečnostní pojistku na noze rámu křesla (1) a tahem nebo tlakem posuňte do požadované polohy (2). Pojistku nechte volně zapadnout do nejbližšího otvoru na noze (3). Před použitím se ujistěte se, že výška je nastavena stejně na všech nohách. S úpravou výšky nohou se mění výška sedu.

**ÚDRŽBA**

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola polohy všech pojistek, stav protiskluzových nástavců. V případě znečištění můžete křeslo omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel. V případě opotřebení protiskluzových nástavců doporučujeme nástavce vyměnit.

SERVIS A OPRAVY

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

PARAMETRY

Počet výškových poloh: 5
 Výška: 76 – 87 cm
 Výška prkénka: 43 – 54 cm
 Vnitřní šířka: 42 cm
 Vnější šířka: 52 cm
 Šířka prkénka: 39 cm
 Délka prkénka: 41 cm
 Hloubka v rozložení: 48 cm
 Rozměr ve složení: 18 x 49,5 x 76 cm
 Kapacita nádoby: max. 5 l
 Hmotnost: 3,5 kg
 Nosnost: 100 kg

NÁVOD K POUŽITÍ**TOALETNÍ
KŘESLO****SKLÁDACÍ**

 pevný hliníkový rám

 snadné složení do
kompaktních rozměrů

 poklop nádoby i prkénka

 upravitelná výška
v rozmezí 76 – 87 cm

 šířka 52 cm


 nosnost 100 kg
**BESCO****BESCO**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost a nastavení výšky křesla konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 100 kg. Při sestavování křesla postupujte opatrně, abyste se vyvarovali zachycení nebo úrazu ruky či prstů. Pro zajištění větší bezpečnosti doporučujeme kombinovat křeslo s madlem a protiskluzovou podložkou. Při použití křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem. Před každým použitím zkontrolujte funkci bezpečnostních pojistek polohy nohou. Ujistěte se, že jsou všechny nohy nastaveny na stejnou výšku a že na křesle nejsou zbytky mýdla, toaletních potřeb a čistících prostředků. Křeslo by mělo být před použitím suché a není určeno pro použití ve vlhkém prostředí, např. ve sprše. Křeslo není určeno k sezení při transportu. Pro manipulaci s toaletní nádobou je nutné zvednout prkénko. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

POUŽITÍ

Toaletní křeslo je kompenzační pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou mobilitou. Křeslo usnadňuje uživateli osobní hygienu, zvyšuje soběstačnost a snižuje riziko pádu. Používá se pro pacienty, kteří nemohou vlivem zdravotního stavu využít standardní toaletu.

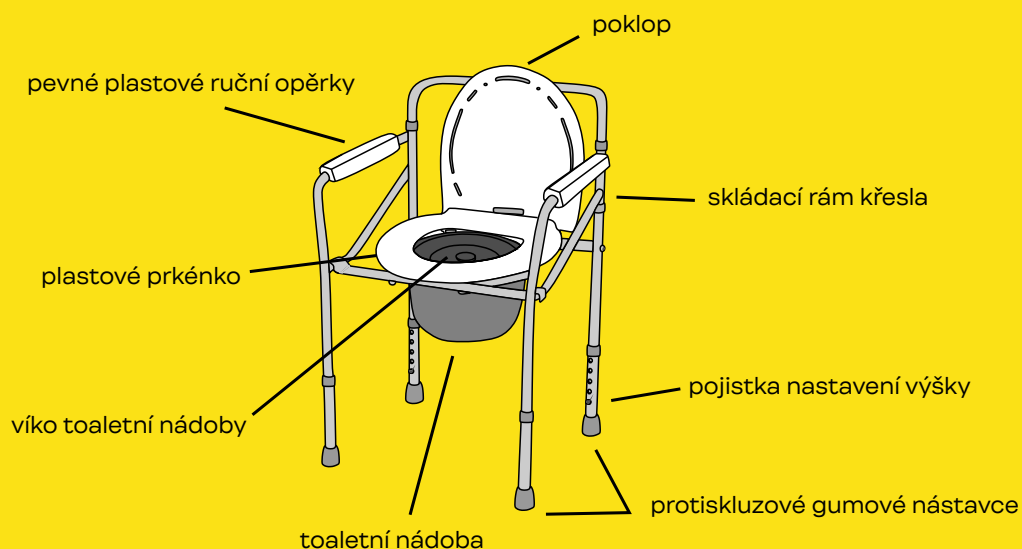POPIS**ROZLOŽENÍ KŘESLA**

Uchopte nohu s opěrkou a otočte ji do polohy kolmo k hlavnímu rámu (1). Otočte druhou nohu s opěrkou okolo hlavního rámu tak, aby byly opěrky k sobě rovnoběžné (2). Uchopte spodní část rámu sedačky a zvedněte ji nahoru, volně položte zakončení na rám křesla dle obrázku (3). Do prostoru v sedací části křesla vložte toaletní nádobu s víkem a následně připevněte prkénko a poklop na rám křesla (4). Křeslo je složeno (5).

